


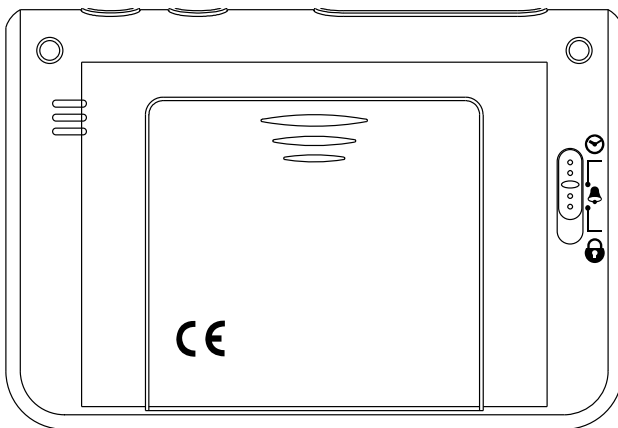


M772-2 Bruksanvisning

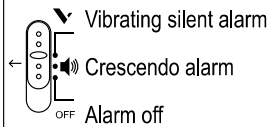

Time setting
Alarm setting
Lock

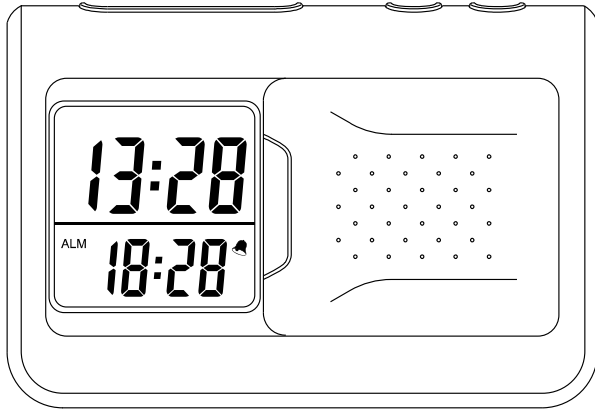

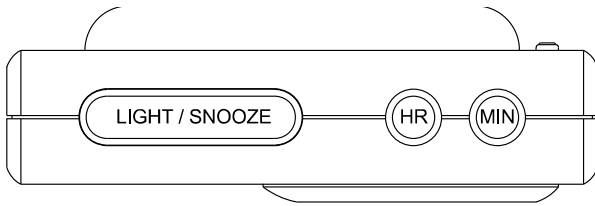



Sätta i batteri

Öppna batterilucka och sätt in 3 st AA batterier enligt polaritets hänvisning. Stäng igen batteriluckan.

Inställning av tid

1. Skjut omkopplarknappen till 🕒 symbolen. Tid displayen börjar då blinka.
2. Tryck "HR" och "MIN" för att ställa in rätt timme och minut.
3. För att lämna inställning av tid, skjut omkopplarknappen till 🔒 Låst position.

Inställning av Vibrations- & Crescendo alarm

1. Skjut omkopplarknappen till  symbolen. Alarmdisplayen börjar då blinka.
2. Tryck "HR" och "MIN" för att ställa in rätt alarm timme och minut.
3. För att lämna inställning av alarm, skjut omkopplarknappen till  Låst position.
4. För att aktivera alarmet, skjut omkopplarknappen för att välja Vibration (tyst) alarm  eller Crescendo alarm . När ett alarm är aktiverat syns en klocksymbol på displayen . För att stänga av alarmfunktionen, skjut omkopplarknappen till "OFF" position. Då försvinner klock symbolen  från displayen.
5. För att stänga av alarmet, skjut omkopplarknappen till "OFF". Alarmet stängs av automatiskt efter 1 minut.

Belysning och Snooze funktion

1. Tryck på "LIGHT/SNOOZE" knappen för att aktivera belysnings funktionen.
2. När alarmet ljuder, tryck på "LIGHT/SNOOZE" knappen för att aktivera belysning och snooze funktionen. Alarmet stängs av och ljuder igen 4 minuter senare.